

抗链球菌溶血素O校准品

货号: LO2306

包装: 5 x 1 ml

批号: 917 LO

效期: 2018-03

产品描述

本品为抗链球菌溶血素 O (ASO) 标准品, 为液态即用型, 该产品适用于体外诊断中临床化学检验系统检测抗链球菌溶血素 O 的校准。

安全预防措施和警告

该产品仅用于体外诊断。禁止用口吸, 按照实验室常规预防措施对试剂进行处理。

该质控品采用人基质血清, 对所有捐献者的血清均进行了 HIV (HIV1、HIV2) 抗体、肝炎 B 表面抗原 (HbsAg) 和肝炎 C 病毒 (HCV) 抗体的测试, 发现均呈阴性。所采用的方法均经 FDA 认证。

然而, 既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质, 因此该质控品和所有的病人样品均应当按照能够传播疾病的样品小心处理。

这种材料中加入了叠氮钠作为防腐剂, 应避免摄入或皮肤及粘膜接触。如果不慎接触皮肤, 应立即用大量清水冲洗患处; 如果不小心摄入或接触眼睛, 应立即寻求医生帮助。

叠氮钠能够与铅和铜质管道发生反应, 形成潜在的爆炸性叠氮化合物。因此, 在处理这种试剂的时候应用大量的水冲洗, 防止叠氮化合物的形成。裸露的金属表面要用 10% 的氢氧化钠清洗干净。

保存和稳定性

若盖好瓶盖、避免污染, 可在 2~8℃ 保存至效期末。每次使用只吸取所需用量, 剩余的样品不可返回原瓶。

使用说明

该校准血清为液态即用型。

赋值

本校准血清系列在朗道实验室赋值, 方法学是胶乳增强免疫比浊法, 参考物质为国际标准制品 (NIBSC Q4578)。具体靶值已在下表中列出。

批号	靶值
917LO	532 IU/ml

注: 详细赋值信息请以原版英文说明书为准, 原版说明书请在英国朗道公司官网 www.randox.com 进行下载。