

## 脂类多项检测用质控品

货号：LE2663

包装：5x3 ml

批号：2534CH

效期：2020-5-28

### 产品描述

该质控品用于直接法的 HDL 和 LDL，脂蛋白 (a)，载脂蛋白 A-1，载脂蛋白 B，胆固醇和甘油三酯在临床生化分析仪上的质量控制。朗道供应 3 种水平（水平 1：LE2661 或 LE2668；水平 2：LE2662 或 LE2669；水平 3：LE2663 或 LE2670）。

### 安全预防措施和警告

本产品仅用于体外诊断。禁止用口吸，按照实验室常规预防措施对试剂进行处理。

该质控品采用人基质血清，对所有捐献者的血清均进行了 HIV (HIV1、HIV2) 抗体、肝炎 B 表面抗原 (HbsAg) 和肝炎 C 病毒 (HCV) 抗体的测试，发现均呈阴性。所采用的方法均经 FDA 认证。

然而，既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质，因此该质控品和所有的病人样品均应当按照能够传播疾病的样品小心处理。

### 保存和稳定性

复溶后，2~8℃可保存 7 天，-20℃再次冷冻可保存 4 周，只能冻融 1 次。脂蛋白 (a) 在-20℃冷冻保存可稳定 16 周。在对于直接法低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)，当在-20℃保存 4 周以后，测量值会有最大 10% 的下降。

未开瓶，2~8℃可保存至效期末。

### 使用说明

小心打开瓶盖，避免材料的任何损失，用 3 ml 的蒸馏水复溶。盖上橡皮塞，拧紧瓶盖，放置 30 分钟。轻轻旋转，确保所有的干粉材料充分溶解。

### 需要自备的材料

移液管

双蒸水

### 赋值

每一批脂类质控血清都要送到大量的外部实验室，根据这些实验室得到的结果以及朗道实验室内部得到的结果进行统计分析赋值。

**注：**详细赋值信息请以原版英文说明书为准，原版说明书请在英国朗道公司官网 [www.randox.com](http://www.randox.com) 进行下载。

## 脂类多项检测用质控品-水平 3

货号：LE2663		批号：2534CH		效期：2020-05-28	
规格：5 x 3ml		范围		低值=靶值-2SD	高值=靶值+2SD
分析物	单位	靶值	低值	高值	方法学
载脂蛋白 A-I	g/l	2.00	1.64	2.36	免疫比浊法
	mg/dl	200	164	236	
	g/l	1.94	1.59	2.29	散射比浊法
载脂蛋白 B	mg/dl	194	159	229	免疫比浊法
	g/l	1.62	1.33	1.91	
	mg/dl	162	133	191	散射比浊法
胆固醇 (CHO)	g/l	1.57	1.29	1.85	免疫比浊法
	mg/dl	157	129	185	
	mmol/l	7.48	6.51	8.45	胆固醇过氧化酶法
HDL - C	mg/dl	289	251	327	Siemens Dimension
	mmol/l	6.94	6.04	7.84	
	mg/dl	268	233	303	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems
	mmol/l	8.23	7.16	9.30	
HDL - C	mg/dl	318	276	360	直接清除法
	mmol/l	1.53	1.30	1.76	
	mg/dl	59.1	50.2	68.0	磷钨酸沉淀法
	mmol/l	1.34	1.14	1.54	
	mg/dl	51.7	44.0	59.4	直接法, 免疫抑制法
	mmol/l	1.34	1.14	1.54	
	mg/dl	51.7	44.0	59.4	直接法, PEG 修饰法
	mmol/l	1.15	0.98	1.32	
	mg/dl	44.4	37.8	51.0	直接法, 罗氏第三代
	mmol/l	1.06	0.90	1.22	
LDL - C	mg/dl	40.9	34.8	47.0	干化学法 Vitros dHDL PTA/MgCl2 direct precipitation
	mmol/l	1.70	1.45	1.96	
	mg/dl	65.6	56.0	75.2	HDL - Ultra
	mmol/l	1.63	1.39	1.87	
LDL - C	mg/dl	62.9	53.7	72.1	直接清除法
	mmol/l	4.87	4.14	5.60	
	mg/dl	188	160	216	计算法
	mmol/l	4.36	3.71	5.01	
脂蛋白 (a)	mg/dl	168	143	193	选择洗涤剂法
	mmol/l	4.43	3.77	5.09	
	mg/dl	171	146	196	免疫比浊法
	nmol/l	54.7	43.8	65.6	
甘油三酯 (TG)	mg/dl	26.0	20.8	31.2	脂肪酶/GPO-PAP (无甘油校正)
	mmol/l	3.87	3.25	4.49	
	mg/dl	342	288	396	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems
	mmol/l	4.57	3.84	5.30	
	mg/dl	404	340	468	脂肪酶/甘油激酶紫外法 (无甘油校正)
	mmol/l	3.86	3.24	4.48	
甘油三酯 (TG)	mg/dl	342	287	397	脂肪酶/甘油脱氢酶
	mmol/l	3.90	3.28	4.52	
甘油三酯 (TG)	mg/dl	345	290	400	
	mmol/l				