

脂蛋白(a)校准血清系列说明书

【包装规格】

货号：LP 3404 规格： 5×1 mL
批号：602144（1629LP-1631LP,1669LP-1670LP）
效期：2024-12-28

【预期用途】

用于脂蛋白（a）检测的校准。

【储存条件及有效期】

本产品 $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ 条件下保存。有效期36个月。

试剂的稳定性与制备

未复溶的校准品 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 可稳定至标签上的有效期。复溶后无污染环境下，Randox LP (a) 校准品 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 可稳定14天。

生产日期及失效日期详见包装标签。

【安全预防警告】

仅用于体外诊断。勿用嘴吸。采取实验室操作试剂的常规措施。

本物质经过人类免疫缺陷病毒(HIV1, HIV2)抗体，乙型表面抗原(HbsAg)和丙肝病毒（HCV）抗体检测，都无反应性。运用 FDA 认可的测试方法。但鉴于没有任何一种方法可以完全保证这些产品不含传染原，因此本物质和所有病人标本必须按传播传染病的要求来处理。

据当地的法规处理废材料。

【检验方法】

校准品按照下面的步骤复溶：

- （1）小心打开瓶子以免洒落
- （2）准确吸取 1mL 蒸馏水复溶
- （3）用橡胶塞子盖上瓶子放置 30 分钟
- （4）轻摇试剂瓶以确保混合均匀
- （5）三十分钟以后将瓶子倒置以确保所有干粉完全溶解
- （6）校准品可用

【赋值】

Randox脂蛋白(a)校准品赋值mg/dl追溯至内部标准。适用于所有生化分析仪。

编号	脂蛋白 (a) mg/dL	效期
1629LP	8.7	2024-12-28
1630LP	16.2	2024-12-28
1631LP	34.1	2024-12-28
1669LP	66.7	2025-03-28
1670LP	87.6	2025-03-28

Randox脂蛋白(a)校准品为特定仪器赋值 (nmol/L)追溯至WHO/IFCC 参考物质Lp(a)

SRM 2B.赋值见下表:

编号	雅培 ALINITY C (nmol/l)	效期
1629LP	14.3	2024-12-28
1630LP	29.5	2024-12-28
1631LP	64.9	2024-12-28
1669LP	142.8	2025-03-28
1670LP	205.7	2025-03-28

编号	贝克曼 DXC 700 AU (nmol/l)	效期
1629LP	13.9	2024-12-28
1630LP	30.1	2024-12-28
1631LP	65.3	2024-12-28
1669LP	148.5	2025-03-28
1670LP	221.9	2025-03-28

编号	罗氏 COBAS C501 (nmol/l)	效期
1629LP	Please contact Technical Services.	2024-12-28
1630LP		2024-12-28
1631LP		2024-12-28
1669LP		2025-03-28
1670LP		2025-03-28

编号	朗道 RX DAYTONA PLUS (nmol/l)	效期
1629LP	13.3	2024-12-28
1630LP	27.0	2024-12-28
1631LP	62.5	2024-12-28
1669LP	156.3	2025-03-28
1670LP	214.5	2025-03-28

编号	朗道RX IMOLA (nmol/l)	效期
1629LP	14.7	2024-12-28
1630LP	29.0	2024-12-28
1631LP	64.1	2024-12-28
1669LP	147.4	2025-03-28
1670LP	209.3	2025-03-28

编号	西门子 ATELLICA CH (nmol/l)	效期
1629LP	13.0	2024-12-28
1630LP	27.4	2024-12-28
1631LP	65.7	2024-12-28
1669LP	147.8	2025-03-28
1670LP	218.3	2025-03-28