

载脂蛋白校准品

货号: LP5047

包装: 3 x 1 ml

批号: 1150LP

效期: 2018-02

产品描述

本品为载脂蛋白分析用校准品, 又称载脂蛋白分析复合定值人基质校准血清。该校准品用于体外诊断中载脂蛋白 A-II (APO A-II)、载脂蛋白 C-II (APO C-II)、载脂蛋白 C-III (APO C-III) 及载脂蛋白 E (APO E) 等项目在临床化学检测系统上的校准。

安全预防措施和警告

本产品仅用于体外诊断。禁止用口吸, 按照实验室常规预防措施对试剂进行处理。

该校准品采用人基质血清, 对所有捐献者的血清均进行了 HIV(HIV1、HIV2) 抗体、肝炎 B 表面抗原(HbsAg) 和肝炎 C 病毒 (HCV) 抗体的测试, 发现均呈阴性。所采用的方法均经 FDA 认证。

然而, 既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质, 因此该质控品和所有的病人样品均应当按照能够传播疾病的样品小心处理。

保存和稳定性

复溶后, 若 2~8℃ 保存可稳定 7 天; 若 -20℃ 冷冻保存可稳定 30 天, 注意只能冻融 1 次。

未开瓶, 2~8℃ 保存可稳定至瓶身上标明的效期末。

使用说明

小心打开瓶盖, 避免材料的任何损失, 用 1 ml 的蒸馏水复溶。盖上橡皮塞, 拧紧瓶盖, 放置 30 分钟。轻轻旋转, 确保所有的干粉材料充分溶解。

需要自备的材料

1000 µL 移液管, 双蒸水

赋值

每一批载脂蛋白校准血清均在朗道实验室赋值, 方法学是免疫比浊法。本批次靶值如下:

分析物	g/l	mg/dl
APO A-II	0.409	40.91
APO C-II	0.042	4.22
APO C-III	0.129	12.89
APO E	0.037	3.72

注: 详细赋值信息请以原版英文说明书为准, 原版说明书请在英国朗道公司官网 www.randox.com 进行下载, 中文翻译说明书。