

糖化血红蛋白校准品

货号：HA3444

包装：1x8 ml, 5x2 ml

批号：464130 (2035HA-2040HA) 效期：2020-02-28

产品描述

本校准品适用于临床化学体外诊断系统检测糖化血红蛋白（HbA_{1c}）的校准。

安全预防措施和警告

本产品仅用于体外诊断。禁止用口吸。按照实验室常规预防措施对试剂进行处理。

该校准品必须由具备合格资质的实验员在合适的条件下用于预期目的。应避免眼睛、皮肤、衣服接触及食入，用后应将相关器具和手充分洗涤干净。

校准品的水平 1 为 0.4% NaOH 的碱溶液。

健康和安数据表备索。

保存和稳定性

未开瓶，2~8℃可保存至瓶身上标明的效期末。

开瓶后，若原瓶保存，并且无污染，2~8℃可保存至瓶身上标明的效期末。

使用说明

该糖化血红蛋白校准品为液态即用型。

1. 使用前至少倒转 5 次以确保混合均匀，同时避免产生气泡；
2. 参照各个检测系统的校准说明；
3. 冷藏剩余的材料，再次使用前应混合均匀；

注意：本校准品不需要预处理。

提供的材料

浓度水平	包装规格
HbA _{1c} 校准系列水平 1	1 x 8 ml
HbA _{1c} 校准系列水平 2	1 x 2 ml
HbA _{1c} 校准系列水平 3	1 x 2 ml
HbA _{1c} 校准系列水平 4	1 x 2 ml
HbA _{1c} 校准系列水平 5	1 x 2 ml
HbA _{1c} 校准系列水平 6	1 x 2 ml

赋值

朗道实验室对该校准血清系列进行赋值，使用朗道的试剂盒和全自动生化分析仪，方法学为乳胶增强免疫比浊法。

LEVEL	SIZE	PROD. NO.	LOT NO.	EXPIRY	HbA _{1c} g/dl	TOTAL HAEMOGLOBIN g/dl
1	8 ml	HA022	2035HA	2020-02-28	0.00	18.86
2	2 ml	HA023	2036HA	2020-02-28	0.45	N/A
3	2 ml	HA024	2037HA	2020-02-28	0.62	N/A
4	2 ml	HA025	2038HA	2020-02-28	0.82	N/A
5	2 ml	HA026	2039HA	2020-02-28	1.31	N/A
6	2 ml	HA027	2040HA	2020-02-28	1.97	N/A

LEVEL	SIZE	PROD. NO.	LOT NO.	EXPIRY	HbA _{1c} μmol/l	TOTAL HAEMOGLOBIN mmol/l
1	8 ml	HA022	2035HA	2020-02-28	0.00	2.93
2	2 ml	HA023	2036HA	2020-02-28	1.70	N/A
3	2 ml	HA024	2037HA	2020-02-28	2.35	N/A
4	2 ml	HA025	2038HA	2020-02-28	3.10	N/A
5	2 ml	HA026	2039HA	2020-02-28	4.96	N/A
6	2 ml	HA027	2040HA	2020-02-28	7.45	N/A

注：详细赋值信息请以原版英文说明书为准，原版说明书请在英国朗道公司官网 www.randox.com 进行下载。