

脂类多项检测用质控品

货号: LE266I 批号: 2560CH
包装: 5 x 3 ml 效期: 2020-09-28
GTIN: 05055273204155

产品描述

该质控品用于直接法的HDL和LDL，脂蛋白(a)，载脂蛋白A-I，载脂蛋白B，胆固醇和甘油三酯在临床生化分析仪上的质量控制。朗道供应3种水平（水平1: LE266I或LE2668；水平2: LE2662或LE2669；水平3: LE2663或LE2670）。

安全预防措施和警告

本产品仅用于体外诊断。禁止用口吸，按照实验室常规预防措施对试剂进行处理。

该质控品采用人基质血清，对所有捐献者的血清均进行了HIV(HIV1、HIV2)抗体、肝炎B表面抗原(HbsAg)和肝炎C病毒(HCV)抗体的测试，发现均呈阴性。所采用的方法均经FDA认证。

然而，既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质，因此该质控品和所有的病人样品均应当按照能够传播疾病的样品小心处理。

保存和稳定性

复溶后，2~8℃可保存7天，-20℃再次冷冻可保存4周，只能冻融1次。脂蛋白(a)在-20℃冷冻保存可

稳定16周。在对于直接法低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)，当在-20℃保存4周以后，测量值会有10%的下降。未开瓶，2~8℃可保存至效期末。

使用说明

小心打开瓶盖，避免材料的任何损失，用3ml的蒸馏水复溶。盖上橡皮塞，拧紧瓶盖，放置30分钟。轻轻旋转，确保所有的干粉材料充分溶解。

需要自备的材料

移液管，双蒸水

赋值

每一批脂类质控血清都要送到大量的外部实验室，根据这些实验室得到的结果以及朗道实验室内部得到的结果进行统计分析赋值。

脂类多项检测用质控品-水平1

货号: LE2661 批号:2560CH

规格: 5 x 3 ml 效期: 2020-09-28

		范围			
分析物	单位	靶值	低值	高值	方法学
载脂蛋白 A-1	g/l	1.02	0.84	1.20	免疫比浊法
	mg/dl	102	83.6	120	
	g/l	1.02	0.84	1.20	散射比浊法
	mg/dl	102	83.6	120	
载脂蛋白 B	g/l	0.86	0.71	1.02	免疫比浊法
	mg/dl	86.1	70.6	102	
	g/l	0.86	0.70	1.01	散射比浊法
	mg/dl	85.5	70.1	101	
胆固醇 (CHO)	mmol/l	3.85	3.35	4.35	胆固醇过氧化酶法
	mg/dl	149	129	169	
	mmol/l	3.79	3.30	4.28	Siemens Dimension
	mg/dl	146	127	165	
HDL-C	mmol/l	0.75	0.63	0.86	直接清除法
	mg/dl	28.8	24.4	33.2	
	mmol/l	0.17	0.14	0.19	磷钨酸沉淀法
	mg/dl	6.41	5.44	7.38	
	mmol/l	0.71	0.60	0.81	直接法, 免疫抑制法
	mg/dl	27.3	23.2	31.4	
	mmol/l	0.69	0.59	0.79	直接法, 免疫抑制法
	mg/dl	26.6	22.6	30.6	
	mmol/l	0.76	0.64	0.87	直接法, PPD 法
	mg/dl	29.2	24.8	33.6	
	mmol/l	0.60	0.51	0.69	直接法, 罗氏第三代
	mg/dl	23.2	19.7	26.7	
LDL-C	mmol/l	0.82	0.69	0.94	HDL - Ultra
	mg/dl	31.5	26.6	36.4	
	mmol/l	2.58	2.19	2.97	直接清除法
	mg/dl	100	84.5	116	
	mmol/l	2.52	2.14	2.90	计算法
	mg/dl	97.3	82.6	112	
	mmol/l	2.37	2.01	2.73	选择洗涤剂法
	mg/dl	91.5	77.6	105	
脂蛋白 (a)	mg/dl	17.3	13.8	20.8	免疫比浊法
	nmol/l	34.1	27.3	40.9	
甘油三酯 (TG)	mmol/l	1.35	1.13	1.57	脂肪酶/GPO-PAP (无甘油校正)
	mg/dl	119	100	138	
	mmol/l	1.37	1.15	1.59	Lipase/GK UV no correction
	mg/dl	121	102	140	
	mmol/l	1.38	1.16	1.60	Lipase/Glycerol Dehydrogenase
	mg/dl	122	103	141	