

质控血清

货号: HE1532

批号: 1270UE

包装: 20 x 5 ml

效期: 2026-01-28

产品描述

本品为质控血清, 又称人基质定值生化质控血清, 适用于临床生化体外诊断的准确性或者重复性质量控制, 朗道供应两种浓度水平的人基质定值生化质控血清 (水平 2: HN1530; 水平 3: HE1532)。

安全预防措施和警告

本产品仅用于体外诊断。禁止用口吸。按照实验室常规预防措施对试剂进行处理。

该质控品采用人基质血清, 对所有捐献者的血清均进行了 HIV (HIV1、HIV2) 抗体、肝炎 B 表面抗原 (HbsAg) 和肝炎 C 病毒 (HCV) 抗体的测试, 发现均呈阴性。所采用的方法均经 FDA 认证。

然而, 既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质, 因此该质控品和所有的病人样品均应当按照能够传播疾病的样品小心处理。

保存和稳定性

复溶后, 建议 2~8℃ 冷藏保存。15~25℃ 可保存 8 小时, 2~8℃ 可保存 7 天, -20℃ 再次冷冻可保存 28 天, 只能冻融 1 次 (见受限情况)。

未开瓶, 2~8℃ 可保存至效期末。

受限情况

1. 为保证总酸性磷酸酶和前列腺酸性磷酸酶的稳定性, 复溶 30 分钟后, 该血清每 1 ml 应当加入 1 滴 (25-30 μ l) 0.7 M 的醋酸溶液。其稳定作用可以使总酸性磷酸酶和前列腺酸性磷酸酶在 15~25℃ 下稳定 2 小时, 在 2~8℃ 下稳定 2 天, 在 -20℃ 下稳定 28 天 (只能冻融 1 次)。
2. 碱性磷酸酶在稳定时间内水平会升高。建议复溶血清在测定前于 15~25℃ 下放置 1 小时。
3. 该质控血清中的胆红素对光敏感, 建议避光保存。在 2~8℃ 下避光保存稳定 4 天。勿置于 15~25℃ 的温度下保存。勿冷冻。
4. 游离脂肪酸 (NEFA) 在 2~8℃ 下稳定 1 天。
5. 总前列腺特异性抗原 (TPSA) 在 2~8℃ 下稳定 4 天, -20℃ 冷冻分装稳定 28 天。
6. 若该复溶血清受细菌污染, 将会降低许多成分的稳定性。不同批号的质控血清不能交叉使用, 因为不同批号的赋值不同。该质控血清不能当作标准血清使用。

使用说明

该人基质定值生化质控血清只能按照以下步骤复溶:

1. 小心打开瓶盖, 避免材料的任何损失;
2. 在 15~25℃ 的室温下, 准确量取 5 mL 蒸馏水复溶 1 瓶质控血清;
3. 盖上橡皮塞, 拧紧瓶盖, 使用前避光放置 30 分钟;
4. 轻轻旋转, 确保内容物完全溶解。勿摇晃, 避免形成泡沫;
5. 用前将小瓶倒置, 确保所有的冻干物完全溶解。勿摇晃, 避免形成泡沫;
6. 参照不同分析仪器的质控说明;
7. 冷藏任何未使用的血清, 下次使用前应充分混匀。

需要自备的材料

移液管, 蒸馏水

赋值

每一批质控血清都要送到参考实验室, 根据国际参考标准进行赋值。若没有国际参考标准, 就使用参考方法。朗道也将质控血清送到全世界 3000 多家实验室, 然后将结果用独特的统计分析赋值。对每一批质控血清, 都提供了不同项目的不同方法学的靶值和靶值范围。质控范围值是平均值 ± 2 S.D.。

注释

® 注册商标

- (1) 由德国内科医生联邦议院认证的参考实验室赋值。
- (2) DGKC: 德国临床化学协会
- (3) IFCC: 国际临床化学联盟
- (4) SCE: 斯堪的纳维亚酶委员会

注: 详细赋值信息请以原版英文说明书为准, 原版说明书请在英国朗道公司官网 www.randox.com 进行下载。

(完整版) 分析用人血清基质 **质控血清** 水平三 (异常水平) (针对所有仪器均值)

货号: **HE1532**

批号: **1270UE**

规格:

20×5ml

效期:

2026-1-28

检测项目	单位	均值	低值限	高值限	±1SD	±2SD	方法
白蛋白 ALB	g/l	30.0	25.5	34.5	2.25	4.50	溴甲酚绿
	g/dl	3.00	2.55	3.45	0.23	0.45	
	g/l	28.0	23.8	32.2	2.10	4.20	溴甲酚紫
	g/dl	2.80	2.38	3.22	0.21	0.42	
	g/l	29.1	24.8	33.4	2.15	4.30	Ortho Vitros Microslide 系统
	g/dl	2.91	2.48	3.34	0.22	0.43	
	g/l	27.4	23.3	31.5	2.05	4.10	比浊法
	g/dl	2.74	2.33	3.15	0.21	0.41	
碱性磷酸酶 ALP	U/l	273	232	314	20.50	41.00	Ortho Vitros Microslide 系统 37°C
	U/l	512	435	589	38.50	77.00	二乙醇胺缓冲液 DEA 37°C
	U/l	399	339	459	30.00	60.00	二乙醇胺缓冲液 DEA 30°C
	U/l	327	278	376	24.50	49.00	二乙醇胺缓冲液 DEA 25°C
	U/l	346	294	398	26.00	52.00	IFCC改良AMP,37°C
	U/l	270	229	311	20.50	41.00	IFCC改良AMP,30°C
	U/l	221	188	254	16.50	33.00	IFCC改良AMP,25°C
	U/l	332	282	382	25.00	50.00	AMP缓冲液, 未改良, 37°C
	U/l	259	220	298	19.50	39.00	AMP缓冲液, 未改良, 30°C
	U/l	212	180	244	16.00	32.00	AMP缓冲液, 未改良, 25°C
	U/l	323	275	371	24.00	48.00	比色法 37°C
	U/l	252	214	290	19.00	38.00	比色法 30°C
	U/l	206	176	236	15.00	30.00	比色法 25°C
丙氨酸氨基转移酶 ALT	U/l	135	108	162	13.50	27.00	比色法 37°C
	U/l	100	80	120	10.00	20.00	比色法 30°C
	U/l	76	61	91	7.50	15.00	比色法 25°C
	U/l	138	111	165	13.50	27.00	Ortho Vitros Microslide 系统 37°C
	U/l	148	118	178	15.00	30.00	含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 37°C
	U/l	110	87	133	11.50	23.00	含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 30°C
	U/l	83	66	100	8.50	17.00	含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 25°C
	U/l	138	110	166	14.00	28.00	不含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 37°C
	U/l	102	81	123	10.50	21.00	不含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 30°C
	U/l	78	62	94	8.00	16.00	不含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 25°C
	U/l	156	125	187	15.50	31.00	NVVC方法, 含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 37°C
	U/l	115	93	137	11.00	22.00	NVVC方法, 含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 30°C
	U/l	88	70	106	9.00	18.00	NVVC方法, 含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 25°C
	U/l	135	108	162	13.50	27.00	Ortho Vitros Microslide visible 37°C
胰淀粉酶 PAMY	U/l	234	199	269	17.50	35.00	免疫抑制EPS底物 37°C
	U/l	237	201	273	18.00	36.00	罗氏液体稳定pNPG7 37°C
	U/l	268	228	308	20.00	40.00	朗道液体乙缩醛pNPG7 37°C
淀粉酶 AMY	U/l	275	234	316	20.50	41.00	西门子阻断pNPG7 37°C
	U/l	221	188	254	16.50	33.00	朗道乙缩醛pNPG7 37°C
	U/l	296	252	340	22.00	44.00	朗道液体乙缩醛pNPG7 37°C
	U/l	264	224	304	20.00	40.00	宝灵曼/罗氏 比色法 pNPG7 37°C
	U/l	261	222	300	19.50	39.00	罗氏2-氯pNPG7 37°C
	U/l	172	146	198	13.00	26.00	Ortho Vitros Microslide 系统 37°C
	U/l	255	217	293	19.00	38.00	其他罗氏2-氯pNPG7 37°C
	U/l	259	220	298	19.50	39.00	罗氏液体稳定pNPG7 37°C
	U/l	316	269	363	23.50	47.00	西门子 2-氯pNP7 37°C
	U/l	275	233	317	21.00	42.00	贝克曼库尔特阻断pNPG7 37°C
	U/l	271	231	311	20.00	40.00	贝克曼 Synchron AMY7 37°C
	U/l	293	249	337	22.00	44.00	雅培 Architect IFCC Cal. 37°C
	U/l	334	284	384	25.00	50.00	雅培 Architect Non-IFCC Cal. 37°C
	U/l	259	220	298	19.50	39.00	贝克曼 CNPG3 (Extinction Coeff) 37°C
载脂蛋白A1 APO A1	g/l	1.15	0.94	1.36	0.10	0.21	免疫透射比浊
	mg/dl	115	94.3	136	10.35	20.70	
载脂蛋白B APO B	g/l	0.64	0.52	0.75	0.06	0.12	免疫透射比浊
	mg/dl	63.8	52.3	75.3	5.75	11.50	
酸性磷酸酶 (总)	U/l	50.0	33.5	66.5	8.25	16.50	1-萘基磷酸酯底物动力学方法, 37°C
天冬氨酸氨基转移酶 AST	U/l	180	144	216	18.00	36.00	Ortho Vitros Microslide visible slide 37°C
	U/l	182	145	219	18.50	37.00	含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 37°C
	U/l	123	98	148	12.50	25.00	含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 30°C
	U/l	87	69	105	9.00	18.00	含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 25°C
	U/l	136	109	163	13.50	27.00	不含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 37°C
	U/l	92	74	110	9.00	18.00	不含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 30°C
	U/l	65	52	78	6.50	13.00	不含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 25°C

(完整版) 分析用人血清基质 **质控血清** 水平三 (异常水平) (针对所有仪器均值)

货号: **HE1532** 批号: **1270UE** 规格: 20×5ml 效期: 2026-1-28

检测项目	单位	均值	低值限	高值限	±1SD	±2SD	方法
天冬氨酸氨基转移酶 AST	U/l	177	141	213	18.00	36.00	NVKC方法, 含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 37°C
	U/l	120	95	145	12.50	25.00	NVKC方法, 含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 30°C
	U/l	84	67	101	8.50	17.00	NVKC方法, 含磷酸吡哆醛的Tris缓冲液, 25°C
总胆汁酸 TBA	μmol/l	41.9	33.5	50.3	4.20	8.40	第4代循环酶法
	μmol/l	42.7	34.2	51.2	4.25	8.50	第5代循环酶法
二氧化碳 CO ₂	mmol/l	14.0	11.1	16.9	1.45	2.90	比色法
	mmol/l	13.7	10.9	16.5	1.40	2.80	酶法
直接胆红素 D.Bil	μmol/l	27.3	21.5	33.1	2.90	5.80	二氯苯重氮(DPD)
	mg/dl	1.60	1.26	1.94	0.17	0.34	
	μmol/l	30.0	23.7	36.3	3.15	6.30	重氮对氨基苯磺酸
	mg/dl	1.76	1.39	2.13	0.19	0.37	
	μmol/l	30.1	23.7	36.5	3.20	6.40	重氮二氯苯胺(DCA)
	mg/dl	1.76	1.39	2.13	0.19	0.37	
	μmol/l	29.9	23.6	36.2	3.15	6.30	氧化胆红素(钒酸盐法)
	mg/dl	1.75	1.38	2.12	0.19	0.37	
	μmol/l	31.2	24.6	37.8	3.30	6.60	改良Jendrassik
	mg/dl	1.83	1.44	2.22	0.20	0.39	
总胆红素 T.Bil	μmol/l	81.9	64.7	99.1	8.60	17.20	Vitros 250/500/700/950 总胆红素
	mg/dl	4.79	3.78	5.80	0.51	1.01	
	μmol/l	89.8	70.9	109	9.45	18.90	重氮二氯苯胺(DCA)
	mg/dl	5.25	4.15	6.35	0.55	1.10	
	μmol/l	84.8	67.0	103	8.90	17.80	重氮对氨基苯磺酸
	mg/dl	4.96	3.92	6.00	0.52	1.04	
	μmol/l	79.8	63.0	96.6	8.40	16.80	二氯苯重氮(DPD)
	mg/dl	4.67	3.69	5.65	0.49	0.98	
	μmol/l	86.9	68.6	105	9.15	18.30	硝基苯重氮盐
	mg/dl	5.08	4.01	6.15	0.54	1.07	
	μmol/l	83.5	65.9	101	8.80	17.60	重氮离子
	mg/dl	4.88	3.86	5.90	0.51	1.02	
	μmol/l	97.0	76.6	117	10.20	20.40	氧化胆红素(钒酸盐法)
	mg/dl	5.67	4.48	6.86	0.60	1.19	
	μmol/l	96.6	76.3	117	10.15	20.30	改良Jendrassik
	mg/dl	5.65	4.46	6.84	0.60	1.19	
钙 Ca	mmol/l	3.08	2.77	3.39	0.16	0.31	甲基酚酞络合剂
	mg/dl	12.3	11.1	13.5	0.60	1.20	
	mmol/l	3.00	2.70	3.30	0.15	0.30	Ortho Vitros Microslide 系统
	mg/dl	12.0	10.8	13.2	0.60	1.20	
	mmol/l	3.01	2.71	3.31	0.15	0.30	离子选择性电极
	mg/dl	12.1	10.9	13.3	0.60	1.20	
	mmol/l	3.10	2.79	3.41	0.16	0.31	甲基百里酚蓝
	mg/dl	12.4	11.2	13.6	0.60	1.20	
	mmol/l	3.06	2.75	3.37	0.16	0.31	偶氮碑III
	mg/dl	12.3	11.0	13.6	0.65	1.30	
	mmol/l	3.07	2.77	3.37	0.15	0.30	罗氏NM-BAPTA标记物
	mg/dl	12.3	11.1	13.5	0.60	1.20	
总胆固醇 CHOL	mmol/l	1.05	0.95	1.16	0.05	0.11	电离钙
	mg/dl	4.21	3.79	4.63	0.21	0.42	
	mmol/l	6.84	5.95	7.73	0.45	0.89	Ortho Vitros Microslide 系统
	mg/dl	264	230	298	17.00	34.00	
	mmol/l	7.18	6.25	8.11	0.47	0.93	胆固醇氧化酶- Abell Kendall
	mg/dl	277	241	313	18.00	36.00	
氯 CL	mmol/l	7.21	6.27	8.15	0.47	0.94	胆固醇氧化酶IDMS
	mg/dl	278	242	314	18.00	36.00	
	mmol/l	7.19	6.25	8.13	0.47	0.94	胆固醇脱氢酶
	mg/dl	278	241	315	18.50	37.00	
胆碱酯酶 CHE	mmol/l	117	108	126	4.50	9.00	比色法
	mmol/l	114	105	123	4.50	9.00	Ortho Vitros Microslide 系统
	mmol/l	112	103	121	4.50	9.00	间接离子选择性电极
	mmol/l	112	103	121	4.50	9.00	直接离子选择性电极
胆碱酯酶 CHE	U/l	5402	4321	6483	540.50	1081.00	比色法 丁酰硫代胆碱 37°C
肌酸激酶 CK	U/l	423	347	499	38.00	76.00	Ortho Vitros Microslide 系统 37°C
	U/l	520	426	614	47.00	94.00	CK-NAC血清启动DGKC 37°C
	U/l	326	267	385	29.50	59.00	CK-NAC血清启动DGKC 30°C
	U/l	221	181	261	20.00	40.00	CK-NAC血清启动DGKC 25°C

(完整版) 分析用人血清基质 **质控血清** 水平三 (异常水平) (针对所有仪器均值)

货号: **HE1532** 批号: **1270UE** 规格: 20×5ml 效期: 2026-1-28

检测项目	单位	均值	低值限	高值限	±1SD	±2SD	方法
肌酸激酶 CK	U/l	535	439	631	48.00	96.00	CK-NAC底物启动DGKC 37°C
	U/l	335	275	395	30.00	60.00	CK-NAC底物启动DGKC 30°C
	U/l	227	187	267	20.00	40.00	CK-NAC底物启动DGKC 25°C
	U/l	519	425	613	47.00	94.00	CK-NAC (IFCC) 37°C
	U/l	325	266	384	29.50	59.00	CK-NAC (IFCC) 30°C
	U/l	221	181	261	20.00	40.00	CK-NAC (IFCC) 25°C
铜 Cu	μmol/l	25.8	20.6	31.0	2.60	5.20	原子吸收
	μg/dl	164	131	197	16.50	33.00	
	μmol/l	25.3	20.2	30.4	2.55	5.10	比色法
	μg/dl	161	128	194	16.50	33.00	
可的松 Cortisol	nmol/l	945	709	1181	118.00	236.00	罗氏Cobas e402/e801
	μg/dl	34.0	25.5	42.5	4.25	8.50	
肌酐 CREAT	μmol/l	385	308	462	38.50	77.00	去蛋白碱性苦味酸法
	mg/dl	4.35	3.48	5.22	0.44	0.87	
	μmol/l	386	308	464	39.00	78.00	非去蛋白碱性苦味酸法
	mg/dl	4.36	3.48	5.24	0.44	0.88	
	μmol/l	404	324	484	40.00	80.00	紫外酶法
	mg/dl	4.57	3.66	5.48	0.46	0.91	
	μmol/l	401	321	481	40.00	80.00	肌酐PAP法
	mg/dl	4.53	3.63	5.43	0.45	0.90	
	μmol/l	396	317	475	39.50	79.00	苦味酸速率法空白
	mg/dl	4.47	3.58	5.36	0.45	0.89	
	μmol/l	392	314	470	39.00	78.00	苦味酸速率法空白比较 (-26μmol/l)
	mg/dl	4.43	3.55	5.31	0.44	0.88	
	μmol/l	386	309	463	38.50	77.00	苦味酸速率法空白补偿 (-18μmol/l)
	mg/dl	4.36	3.49	5.23	0.44	0.87	
	μmol/l	397	318	476	39.50	79.00	美国强生Vitros IDMS(同位素稀释质谱法)
	mg/dl	4.49	3.59	5.39	0.45	0.90	
	μmol/l	391	313	469	39.00	78.00	IDMS(同位素稀释质谱法)
	mg/dl	4.42	3.54	5.30	0.44	0.88	
D3(β)-羟丁酸 Ranbut	mmol/l	1.10	0.93	1.27	0.08	0.17	Tris缓冲液 100mmol/l pH8.5
地高辛 Digoxin	nmol/l	3.74	2.99	4.49	0.38	0.75	免疫比浊
	ng/ml	2.92	2.34	3.50	0.29	0.58	
叶酸 Folate	nmol/l	7.05	5.36	8.74	0.85	1.69	罗氏Cobas e402/e801
	ng/ml	3.11	2.36	3.86	0.38	0.75	
游离T4 FT4	pmol/l	54.2	40.7	67.7	6.75	13.50	雅培Architect
	ng/dl	4.23	3.17	5.29	0.53	1.06	
	pg/ml	42.3	31.7	52.9	5.30	10.60	
	pmol/l	66.3	49.7	82.9	8.30	16.60	西门子Centaur XP / XPT/Classic
	ng/dl	5.17	3.88	6.46	0.65	1.29	
	pg/ml	51.7	38.8	64.6	6.45	12.90	
	pmol/l	61.0	45.8	76.2	7.60	15.20	贝克曼 Access
	ng/dl	4.76	3.57	5.95	0.60	1.19	
	pg/ml	47.6	35.7	59.5	5.95	11.90	
	pmol/l	77.3	58.0	96.6	9.65	19.30	罗氏Cobas 4000 / E411
	ng/dl	6.03	4.52	7.54	0.76	1.51	
	pg/ml	60.3	45.2	75.4	7.55	15.10	
	pmol/l	81.8	61.3	102	10.25	20.50	罗氏Cobas e601/602
	ng/dl	6.38	4.78	7.98	0.80	1.60	
	pg/ml	63.8	47.8	79.8	8.00	16.00	
	pmol/l	74.8	56.1	93.5	9.35	18.70	BioMerieux Vidas FT4N Kit
	ng/dl	5.83	4.38	7.28	0.73	1.45	
	pg/ml	58.3	43.8	72.8	7.25	14.50	
	pmol/l	81.6	61.2	102	10.20	20.40	罗氏Cobas e401/e801
	ng/dl	6.36	4.77	7.95	0.80	1.59	
	pg/ml	63.6	47.7	79.5	7.95	15.90	
庆大霉素 Gentamicin	μmol/l	19.0	15.2	22.8	1.90	3.80	Gravimetric
	μg/ml	9.08	7.27	10.9	0.91	1.81	

(完整版) 分析用人血清基质 **质控血清** 水平三 (异常水平) (针对所有仪器均值)

货号: **HE1532** 批号: **1270UE** 规格: 20×5ml 效期: 2026-1-28

检测项目	单位	均值	低值限	高值限	±1SD	±2SD	方法
γ-谷氨酰转肽酶 GGT	U/l	154	131	177	11.50	23.00	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 37°C
	U/l	121	103	139	9.00	18.00	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 30°C
	U/l	95	81	109	7.00	14.00	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 25°C
	U/l	194	165	223	14.50	29.00	Ortho Vitros Microslide 系统 37°C
	U/l	163	138	188	12.50	25.00	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 (IFCC) 37°C
	U/l	128	109	147	9.50	19.00	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 (IFCC) 30°C
	U/l	101	85	117	8.00	16.00	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 (IFCC) 25°C
	U/l	173	147	199	13.00	26.00	朗道γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 37°C
	U/l	136	116	156	10.00	20.00	朗道γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 30°C
	U/l	107	91	123	8.00	16.00	朗道γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 25°C
谷氨酰脱氢酶 GLDH	U/l	30	24	36	3.00	6.00	三乙胺缓冲液 50 mmol/l 37°C
	U/l	23	18	28	2.50	5.00	三乙胺缓冲液 50 mmol/l 30°C
	U/l	19	15	23	2.00	4.00	三乙胺缓冲液 50 mmol/l 25°C
葡萄糖 Glu	mmol/l	14.9	12.7	17.1	1.10	2.20	Ortho Vitros Microslide 系统
	mg/dl	268	229	307	19.50	39.00	
	mmol/l	15.4	13.1	17.7	1.15	2.30	葡萄糖脱氢酶
	mg/dl	278	236	320	21.00	42.00	
	mmol/l	15.7	13.3	18.1	1.20	2.40	己糖激酶
	mg/dl	283	240	326	21.50	43.00	
α 羟丁酸 α -HBDH	mmol/l	15.8	13.4	18.2	1.20	2.40	葡萄糖氧化酶
	mg/dl	285	241	329	22.00	44.00	
	U/l	367	290	444	38.50	77.00	2-羧基丁酸<10mmol/l 37°C
高密度脂蛋白胆固醇 HDL	U/l	277	219	335	29.00	58.00	2-羧基丁酸<10mmol/l 30°C
	U/l	208	164	252	22.00	44.00	2-羧基丁酸<10mmol/l 25°C
	mmol/l	2.47	2.10	2.84	0.19	0.37	直接测定选择性抑制 (遮蔽) 法
	mg/dl	95.3	81.1	110	7.10	14.20	
	mmol/l	2.55	2.17	2.93	0.19	0.38	直接测定免疫分离法
	mg/dl	98.4	83.8	113	7.30	14.60	
	mmol/l	2.42	2.06	2.78	0.18	0.36	强生Vitros磁性去脂蛋白法 (干片)
	mg/dl	93.4	79.5	107	6.95	13.90	
	mmol/l	2.80	2.38	3.22	0.21	0.42	直接测定PEG修饰酶法
	mg/dl	108	91.9	124	8.05	16.10	
免疫球蛋白A IgA	mmol/l	2.35	1.99	2.71	0.18	0.36	直接测定直接清除法
	mg/dl	90.7	76.8	105	6.95	13.90	
	mmol/l	2.49	2.12	2.86	0.19	0.37	强生Vitros 磷钨酸/氯化镁直接沉淀法
	mg/dl	96.1	81.8	110	7.15	14.30	
	mmol/l	2.43	2.07	2.79	0.18	0.36	均相测定法
	mg/dl	93.8	79.9	108	6.95	13.90	
	mmol/l	2.93	2.49	3.37	0.22	0.44	罗氏第四代直接测定法
	mg/dl	113	96.1	130	8.45	16.90	
	g/l	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	免疫比浊法
	mg/dl	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	
免疫球蛋白G IgG	g/l	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	免疫比浊法
	mg/dl	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	
免疫球蛋白M IgM	g/l	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	免疫比浊法
	mg/dl	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	
铁 Fe	μmol/l	36.9	30.2	43.6	3.35	6.70	比色法 (标本经沉淀预处理)
	μg/dl	206	169	243	18.50	37.00	
	μmol/l	37.0	30.4	43.6	3.30	6.60	比色法 (标本未经沉淀预处理)
	μg/dl	207	170	244	18.50	37.00	
	μmol/l	34.4	28.2	40.6	3.10	6.20	Ortho Vitros Microslide 系统
乳酸 Lactate	μg/dl	192	158	226	17.00	34.00	
	mmol/l	5.34	4.38	6.30	0.48	0.96	离子选择性电极
	mg/dl	48.1	39.5	56.7	4.30	8.60	
	mmol/l	5.32	4.36	6.28	0.48	0.96	乳酸氧化酶比色法
	mg/dl	47.9	39.3	56.5	4.30	8.60	
	mmol/l	4.87	3.99	5.75	0.44	0.88	Ortho Vitros Microslide 系统
乳酸 Lactate	mg/dl	43.9	35.9	51.9	4.00	8.00	
	mmol/l	5.01	4.11	5.91	0.45	0.90	酶电极法
	mg/dl	45.1	37.0	53.2	4.05	8.10	

(完整版) 分析用人血清基质 **质控血清** 水平三 (异常水平) (针对所有仪器均值)

货号: **HE1532**

批号: **1270UE**

规格: 20×5ml

效期:

2026-1-28

检测项目	单位	均值	低值限	高值限	±1SD	±2SD	方法
乳酸脱氢酶 LDH	U/l	331	281	381	25.00	50.00	L→P 37°C
	U/l	239	203	275	18.00	36.00	L→P 30°C
	U/l	168	142	194	13.00	26.00	L→P 25°C
	U/l	737	626	848	55.50	111.00	P→L 斯堪的纳维亚及荷兰 37°C
	U/l	532	452	612	40.00	80.00	P→L 斯堪的纳维亚及荷兰 30°C
	U/l	374	317	431	28.50	57.00	P→L 斯堪的纳维亚及荷兰 25°C
	U/l	696	592	800	52.00	104.00	P→L 德国 37°C
	U/l	503	427	579	38.00	76.00	P→L 德国 30°C
	U/l	353	300	406	26.50	53.00	P→L 德国 25°C
	U/l	710	604	816	53.00	106.00	P→L SFBC 37°C
	U/l	513	436	590	38.50	77.00	P→L SFBC 30°C
	U/l	360	306	414	27.00	54.00	P→L SFBC 25°C
	U/l	346	294	398	26.00	52.00	L→P IFCC 37°C
	U/l	250	212	288	19.00	38.00	L→P IFCC 30°C
	U/l	175	149	201	13.00	26.00	L→P IFCC 25°C
	U/l	361	307	415	27.00	54.00	Ortho Vitros IFCC Traceable 37°C
脂肪酶 Lipase	U/l	76	61	91	7.50	15.00	其他比色法 37°C
	U/l	83	67	100	8.25	16.50	Ortho Vitros Microslide 系统 37°C
	U/l	78	62	94	8.00	16.00	罗氏比色法 37°C
	U/l	98	79	117	9.50	19.00	朗道比色法 37°C
锂 Li	mmol/l	2.10	1.85	2.35	0.13	0.25	离子选择性电极
	mg/dl	1.46	1.28	1.64	0.09	0.18	
	mmol/l	1.98	1.75	2.21	0.12	0.23	光谱光度测量
	mg/dl	1.37	1.22	1.52	0.08	0.15	
镁 Mg	mmol/l	1.79	1.58	2.00	0.11	0.21	偶氮砷III
	mg/dl	4.35	3.84	4.86	0.26	0.51	
	mmol/l	1.86	1.64	2.08	0.11	0.22	Ortho Vitros Microslide 系统
	mg/dl	4.52	3.99	5.05	0.27	0.53	
	mmol/l	1.81	1.60	2.02	0.11	0.21	钙镁络合指示剂
	mg/dl	4.40	3.89	4.91	0.26	0.51	
	mmol/l	1.83	1.61	2.05	0.11	0.22	二甲苯胺蓝
	mg/dl	4.45	3.91	4.99	0.27	0.54	
	mmol/l	1.89	1.66	2.12	0.12	0.23	甲基麝香草酚蓝
	mg/dl	4.59	4.03	5.15	0.28	0.56	
	mmol/l	1.84	1.62	2.06	0.11	0.22	马来酸氯苯吡胺III
	mg/dl	4.47	3.94	5.00	0.27	0.53	
	mmol/l	1.83	1.61	2.05	0.11	0.22	酶法
	mg/dl	4.45	3.91	4.99	0.27	0.54	
游离脂肪酸 NEFA	mmol/l	0.56	0.45	0.68	0.06	0.11	比色法
摩尔渗透压浓度 Osmolality	mOsm/kg	352	282	422	35.00	70.00	计算法
	mOsm/kg	375	300	450	37.50	75.00	冰点抽压法
扑热息痛 Paracetamol	mmol/l	0.60	0.48	0.71	0.06	0.12	Gravimetric
	mg/l	90.0	72.0	108	9.00	18.00	
无机磷 P	mmol/l	2.37	2.01	2.73	0.18	0.36	Ortho Vitros Microslide 系统
	mg/dl	7.35	6.23	8.47	0.56	1.12	
	mmol/l	2.34	1.99	2.69	0.18	0.35	磷酸盐酶法
	mg/dl	7.25	6.17	8.33	0.54	1.08	
	mmol/l	2.35	2.00	2.70	0.18	0.35	紫外磷酸盐法
	mg/dl	7.29	6.20	8.38	0.55	1.09	
钾 K	mmol/l	5.95	5.47	6.43	0.24	0.48	Ortho Vitros Microslide 系统
	mmol/l	5.97	5.49	6.45	0.24	0.48	直接离子选择性电极法
	mmol/l	6.06	5.58	6.54	0.24	0.48	间接离子选择性电极法
	mmol/l	6.22	5.72	6.72	0.25	0.50	酶法
总蛋白 TP	g/l	47.0	37.6	56.4	4.70	9.40	Ortho Vitros Microslide 系统
	g/dl	4.70	3.76	5.64	0.47	0.94	
	g/l	45.5	36.4	54.6	4.55	9.10	双缩脲终点法
	g/dl	4.55	3.64	5.46	0.46	0.91	
	g/l	45.5	36.4	54.6	4.55	9.10	双缩脲动力法
	g/dl	4.55	3.64	5.46	0.46	0.91	

(完整版) 分析用人血清基质 **质控血清** 水平三 (异常水平) (针对所有仪器均值)

货号: **HE1532** 批号: **1270UE** 规格: 20×5ml 效期: 2026-1-28

检测项目	单位	均值	低值限	高值限	±1SD	±2SD	方法
总前列腺特异抗原 TPSA	ng/ml =	21.6	16.2	27.0	2.70	5.40	贝克曼 Access Hybritech 标准
	ng/ml =	22.0	16.5	27.5	2.75	5.50	梅里埃 VIDAS TPSA
	ng/ml =	18.1	13.6	22.6	2.25	4.50	西门子Centaur XP/XPT/Classic
	ng/ml =	16.3	12.2	20.4	2.05	4.10	雅培Architect
	ng/ml =	20.5	15.4	25.6	2.55	5.10	罗氏 Cobas E411
	ng/ml =	20.0	15	25.0	2.50	5.00	罗氏 Cobas 6000/8000
阿司匹林 Salicylate	mmol/l	0.87	0.70	1.04	0.09	0.17	Gravimetric
	mg/dl	12.0	9.59	14.4	1.21	2.41	
钠 Na	mmol/l	155	147	163	4.00	8.00	Ortho Vitros Microslide 系统
	mmol/l	156	148	164	4.00	8.00	直接离子选择性电极法
	mmol/l	158	150	166	4.00	8.00	间接离子选择性电极法
	mmol/l	161	153	169	4.00	8.00	酶法
茶碱 Theophylline	μmol/l	139	111	166	13.85	27.70	Gravimetric
	μg/ml	25.0	20.0	30.0	2.50	5.00	
促甲状腺激素 TSH	μU/ml =	1.05	0.84	1.26	0.10	0.21	雅培 Architect
	μU/ml =	1.32	1.05	1.59	0.14	0.27	梅里埃 VIDAS TSH
	μU/ml =	1.47	1.18	1.76	0.15	0.29	罗氏 Cobas 4000/E411
	μU/ml =	1.48	1.18	1.78	0.15	0.30	罗氏 Cobas e601/602
	μU/ml =	1.17	0.94	1.40	0.12	0.23	西门子Centaur XP/XPT/Classic TSH3-Ultra
	μU/ml =	1.22	0.98	1.46	0.12	0.24	Beckman Access hyperTSH 3rd Generation
	μU/ml =	1.48	1.18	1.78	0.15	0.30	罗氏 Cobas e402/801
	μU/ml =	1.48	1.18	1.78	0.15	0.30	罗氏 Cobas e402/801
总铁结合力 TIBC	μmol/l	39.6	31.3	47.9	4.15	8.30	清除过量游离铁
	μg/dl	221	175	267	23.00	46.00	
	μmol/l	41.4	32.7	50.1	4.35	8.70	铁+未结合铁 (铁饱和度)
	μg/dl	231	183	279	24.00	48.00	
	μmol/l	43.9	34.7	53.1	4.60	9.20	直接比色法
	μg/dl	245	194	296	25.50	51.00	
	μmol/l	43.2	34.1	52.3	4.55	9.10	转铁蛋白计算法
	μg/dl	241	191	291	25.00	50.00	
妥布霉素 Tobramycin	μmol/l	51.2	40.4	62.0	5.40	10.80	朗道直接检测
	μg/dl	286	226	346	30.00	60.00	
妥布霉素 Tobramycin	μmol/l	15.6	12.5	18.7	1.55	3.10	Gravimetric
	μg/ml	7.30	5.85	8.75	0.73	1.45	
总T3 TT3	nmol/l	2.63	1.97	3.29	0.33	0.66	雅培Architect
	ng/ml	1.71	1.28	2.14	0.22	0.43	
	ng/dl	171	128	214	21.50	43.00	
	nmol/l	3.89	2.92	4.86	0.49	0.97	罗氏 Cobas 4000 / E411
	ng/ml	2.53	1.90	3.16	0.32	0.63	
	ng/dl	253	190	316	31.50	63.00	
总T4 TT4	nmol/l	227	170	284	28.50	57.00	雅培Architect
	μg/dl	17.7	13.3	22.1	2.20	4.40	
	ng/ml	177	133	221	22.00	44.00	
	nmol/l	208	156	260	26.00	52.00	罗氏 Cobas 4000 / E411
	μg/dl	16.2	12.2	20.2	2.00	4.00	
	ng/ml	162	122	202	20.00	40.00	
	nmol/l	198	149	247	24.50	49.00	罗氏 Cobas e601 / 602
	μg/dl	15.4	11.6	19.2	1.90	3.80	
	ng/ml	154	116	192	19.00	38.00	
转铁蛋白 Transferrin	g/l	1.77	1.42	2.12	0.18	0.35	免疫比浊法
	mg/dl	177	142	212	17.50	35.00	
甘油三脂 TG	mmol/l	2.90	2.44	3.36	0.23	0.46	脂肪酶/GPO-PAP 无游离甘油校正
	mg/dl	257	216	298	20.50	41.00	
	mmol/l	2.91	2.44	3.38	0.24	0.47	脂肪酶/GPO-PAP 0.11mmol/l 校正
	mg/dl	258	216	300	21.00	42.00	
	mmol/l	2.90	2.44	3.36	0.23	0.46	脂肪酶/甘油激酶终点法.无游离甘油校正
	mg/dl	257	216	298	20.50	41.00	
	mmol/l	2.92	2.45	3.39	0.24	0.47	脂肪酶/甘油激酶终点法.0.11mmol/l 校正
	mg/dl	258	217	299	20.50	41.00	
	mmol/l	2.90	2.43	3.37	0.24	0.47	脂肪酶/甘油脱氢酶
	mg/dl	257	215	299	21.00	42.00	
甘油三脂 TG	mmol/l	3.26	2.74	3.78	0.26	0.52	Ortho Vitros Microslide 系统
	mg/dl	289	242	336	23.50	47.00	

(完整版) 分析用人血清基质 **质控血清** 水平三 (异常水平) (针对所有仪器均值)

货号: **HE1532** 批号: **1270UE** 规格: 20×5ml 效期: 2026-1-28

检测项目	单位	均值	低值限	高值限	±1SD	±2SD	方法
不饱和铁结合力 UIBC	μmol/l	6.90	5.66	8.14	0.62	1.24	TIBC - FE
	μg/dl	38.6	31.6	45.6	3.50	7.00	
尿酸 UA	mmol/l	0.52	0.45	0.59	0.03	0.07	Ortho Vitros Microslide 系统
	mg/dl	8.70	7.58	9.82	0.56	1.12	尿酸过氧化物酶联合抗坏血酸氧化酶
	mmol/l	0.55	0.48	0.62	0.04	0.07	
	mg/dl	9.24	8.03	10.5	0.61	1.21	尿酸过氧化物酶无抗坏血酸氧化酶
	mmol/l	0.55	0.48	0.62	0.04	0.07	分光光度计 280-290 nm
	mg/dl	9.26	8.05	10.5	0.61	1.21	
	mmol/l	0.54	0.47	0.61	0.04	0.07	尿酸过氧化物酶联合抗坏血酸氧化酶 546nm
	mg/dl	9.09	7.90	10.3	0.60	1.19	
尿素 Urea	mmol/l	18.3	15.5	21.1	1.40	2.80	Ortho Vitros Microslide 系统
	mg/dl	110	93.2	127	8.40	16.80	尿素酶终点法
	mmol/l	18.9	16.1	21.7	1.40	2.80	
	mg/dl	114	96.8	131	8.60	17.20	尿素酶动力法
	mmol/l	19.4	16.5	22.3	1.45	2.90	
	mg/dl	117	99.2	135	8.90	17.80	尿素氮
	mmol/l	19.4	16.5	22.3	1.45	2.90	
	mg/dl	54.4	46.2	62.6	4.10	8.20	尿素酶次氯酸盐
维生素B12 Vit B12	pmol/l	220	176	264	22.00	44.00	罗氏 Cobas e402/e801
	pg/ml	298	238	358	30.00	60.00	
锌 Zn	μmol/l	34.3	27.4	41.2	3.45	6.90	去蛋白比色法
	μg/dl	224	179	269	22.50	45.00	